


Bedienungsanleitung Massageliege

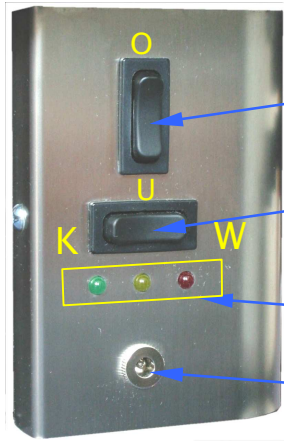

M1 Steuerung Vertikal (Auf „O“ – Ab „U“)

M2 Steuerung Horizontal (Walken oder Kneten)

Lade- und Funktionsanzeigen

Anschlussbuchse für Ladegerät

Hinweis: Steuerkonsole ist nicht beschriftet

Steuerungs-Funktionen

- M1** Kurz drücken Automatische Vertikalbewegung wird ein- oder ausgeschaltet.
Beim Ausschalten fährt die Vertikalbewegung automatisch in die untere Endstellung.
- Lang drücken Vertikalbewegung kann auf bestimmte Höhe gefahren werden und verbleibt dort, sobald M1 losgelassen wird.
 O: nach oben U: nach unten
Bewegung schaltet automatisch nach Erreichen der oberen/unteren Endstellung ab
- M2** Kurz drücken Automatische Horizontalbewegung wird ein- oder ausgeschaltet.
 W: Walken K: Kneten
- Lang drücken Horizontalbewegung ist solange in Betrieb, bis M1 wieder losgelassen wird.

Der Betrieb der Bewegungen wird entweder durch kurzes drücken von M1 und/oder M2 oder automatisch nach 15 Minuten beendet

Lade- und Funktionsanzeigen

Füllstandsanzeige

ohne angeschlossenes Ladegerät

Zustand		Leuchtet
100 – 66 %	Voll	
66 – 33 %	Halb voll	
33 – 0 %	Leer	

Je nach Belastung reicht eine Akkuladung für ca. 3 Stunden Betrieb

Funktionsanzeige

Funktion	Blinkt
Die Vertikalbewegung fährt automatisch in die untere Endstellung	

Störungsanzeige

Störung	Schnelles Blinken
---------	-------------------

Ladeanzeige

mit angeschlossenem Ladegerät

Zustand	Blinkt	Leuchtet
0 %		
33 %		
66 %		
100 %		

Die Leuchtanzeigen blinken und leuchten während des Aufladens in unterschiedlichen Farben, abhängig vom Ladestand des Akkus.

Wird der Stuhl betrieben, während das Ladegerät angeschlossen ist, erfolgt während des Betriebes keine Aufladung des Akkus!

Die Ladezeit für eine volle Akkuladung beträgt ca. 8 Stunden.

Bedienungsanleitung Massageliege

Motorenstörung

